



veneer[™]

dans les règles de l'art

Simplifiez vous la vie
dans la réalisation
de vos composites
esthétiques
antérieurs


Uveneer™, qu'est ce que c'est ?

Uveneer est un système de modèles unique, peu invasif, qui permet de faciliter la réalisation de vos restaurations esthétiques antérieures en composite avec une forme et une symétrie prédictibles — en une seule visite. Chaque modèle imite la dent naturelle et est conçu pour créer des restaurations antérieures avec un aspect naturel. Uveneer utilise des technologies qui permettent au dentiste d'atteindre une restauration anatomiquement correcte, en moins de temps nécessaire pour le faire à main levée. Uveneer apporte une reproductibilité et un caractère prédictible.


Chaque modèle réutilisable, autoclavable est conçu pour imiter l'anatomie dentaire selon les règles de conception du sourire et de la « proportionnalité du nombre d'or » en y incorporant une hauteur idéale pour le rapport entre la largeur de contour, l'embrasure, et le centre de la ligne médiane.

En raison du contour facial anatomique précis des dents des modèles, le résultat final donnera différentes épaisseurs de composite (moins important au tiers incisal et les zones gingivales et plus important au milieu de la surface faciale). Grâce à la variation de l'épaisseur créant différents effets et valeurs, seule une nuance de composite est nécessaire pour obtenir un effet de dégradé naturel. Cependant, les multiples nuances de composite peuvent encore servir selon la technique préférée.

- Permet des restaurations en composite prévisibles, prédictibles
- Empêche la couche d'inhibition de l'oxygène pendant la polymérisation, ayant pour résultat une surface dure et brillante
- Permet à la lumière de passer du modèle au composite pour une polymérisation efficace
- Se détache facilement de la résine composite polymérisée
- Nécessite un minimum de réglage ou de polissage, ce qui fait gagner du temps
- Facilite l'application sur une ou plusieurs dents
- Est autoclavable et réutilisable, ce qui en fait un choix économique

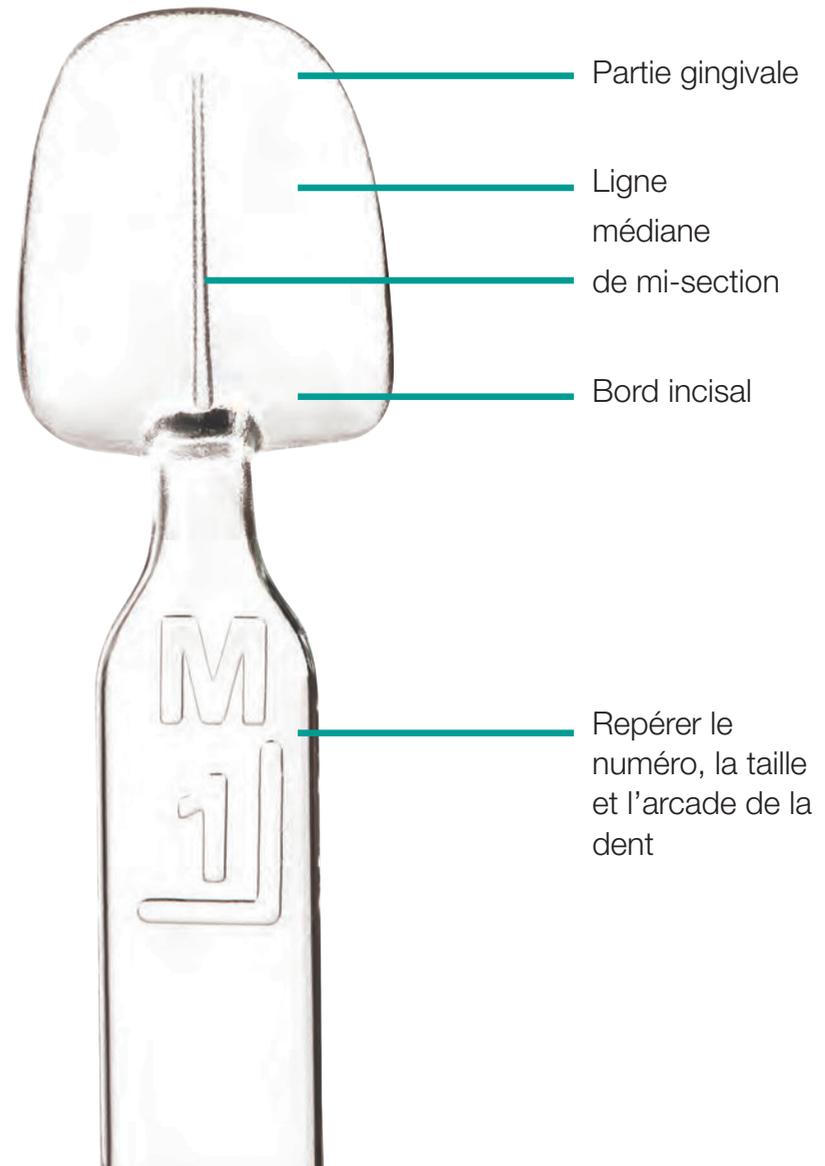


Guide Technique

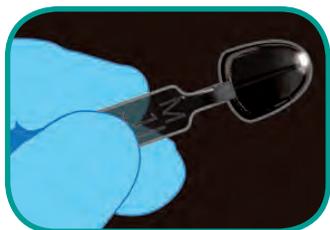


1. Choisir la ou les teintes de votre composite. Sélectionner le modèle qui correspond à la dent à restaurer. Le manche du moule indique le numéro de la dent, sa taille et l'arcade correspondante.



2. Éliminer les tissus carieux si nécessaire et préparer la dent à minima.

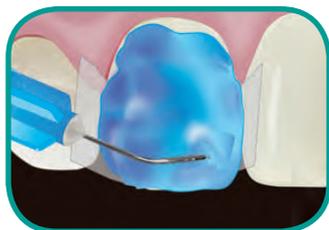

3. Placer une matrice dans les espaces interproximaux et appliquer Ultra-Etch®.

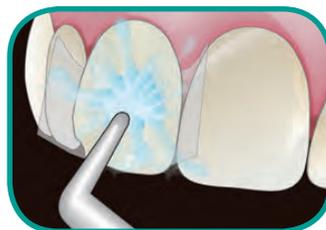

4. Rincer Ultra-Etch en respectant les recommandations d'Ultradent.



5. Appliquer Peak® Universal Bond sur la surface de la dent.



6. Photo-polymériser avec VALO® 10 sec en mode standard.




7. Appliquer directement le composite sur la dent.



8. Ne pas photo-polymériser le composite.




9. Sélectionner le modèle Uveneer choisi. Le modèle devrait couvrir idéalement toute la surface faciale de la dent. Si non, un composite supplémentaire peut-être utilisé en périphérie afin de compenser l'écart.

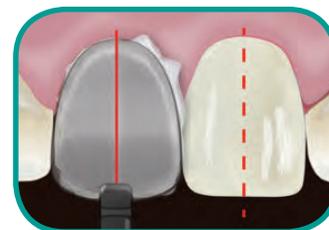


10. Aligner la ligne centrale du modèle parallèlement à la ligne médiane de la face et perpendiculairement par rapport au plan incisal. Avec le pouce, presser la face concave du modèle choisi sur la dent. Appuyer fermement pour chasser l'air.



11. Retirer les excès de composite de la périphérie.

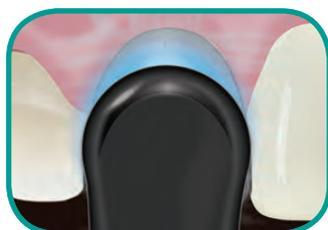


12. Photo-polymériser le composite à travers le modèle avec la lampe VALO®. Pour chaque couche de 2mm, photo-polymériser 1 à 2 fois 10 secondes en mode standard, 1 à 2 fois 4 secondes en mode High power et 1 à 2 fois 3 secondes en mode Xtra power.

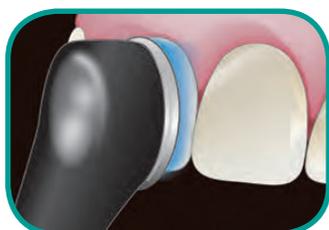

13. Retirer le modèle Uveneer en soulevant doucement le manche. Avec VALO, effectuer la photopolymérisation finale directement sur le composite. Pour s'assurer que le composite soit complètement polymériser, pour chaque couche de 2 mm, photopolymériser 3 fois 10 secondes en mode standard, 3 fois 4 secondes en mode High Power ou 3 fois 3 secondes en mode Xtra power.



14. En évitant de toucher la surface vestibulaire brillante, éliminer les excès de composite en périphérie avec une fraise flamme du kit Composite finishing bur kit d'Ultradent®. Utiliser les composite Polishers, les scies proximales pour les finitions et ajustements minimes si nécessaire.

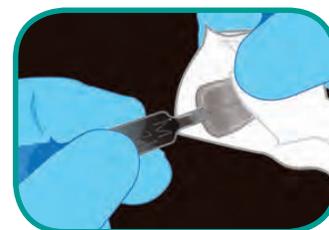

15. Immédiatement après son utilisation, nettoyer le modèle minutieusement avec un tampon d'alcool, sécher, emballer puis autoclaver selon les instructions Uveneer. Ne pas laisser de résidu de composite dans le modèle afin de conserver sa translucidité et son brillant.

Facettes temporaires :

Suivez les mêmes étapes pour des facettes en composite direct mais appliquez l'Ultra-Etch® et faites adhérer avec ClearTemp® LC ou le gel de mordantage et l'adhésif de votre choix.

Maquettes :

Suivez les mêmes étapes pour des facettes en composite direct, mais ne les préparez pas, ne les mordancez pas et ne les collez pas.

Le système comprend un ensemble complet de modèles translucides qui permet une reproduction de l'anatomie de la dent antérieure. Chaque modèle est fabriqué dans un plastique de qualité médicale avec un revêtement antiadhésif qui n'adhère pas au composite et est réutilisable et autoclavable.



Les modèles de tailles moyennes et grandes comprennent les modèles des 2 incisives centrales, des 2 incisives latérales, des 2 canines et des 2 prémolaires pour les 2 arcades supérieures et inférieures.

UVKV2

Kit Uveneer

16 x modèles arcades supérieures et inférieures Medium

16 x modèles arcades supérieures et inférieures Large



Cas cliniques



Dr. Marc APAP



Dr. VALLEE



Dr. Rony Rivera



Dr. Chong Ma

Uveneer répond aux demandes esthétiques les plus exigeantes, mais qu'en sera-t-il de votre collage ?

L'adhésif est essentiel en particulier lors de la réalisation de composites esthétiques antérieurs en méthode directe, laissez-vous votre collage décider de votre résultat ?

Ultradent vous offre une solution fiable, garantissant une sécurité absolue lors de la mise en place de vos gabarits Uveneer : l'adhésif unique Peak Universal Bond.

Adhésif universel, en seringue ou en flacon, Peak Universal Bond a des propriétés chémo et photopolymérisable. De plus, il est le seul adhésif du marché à contenir de la chlorhexidine, ce qui permet d'augmenter de 30 % l'adhésion à long-terme.

C'est pourquoi Ultradent vous recommande Peak Universal Bond avec Uveneer.

le seul
adhésif
contenant
de la
Chlorhexidine

Utiliser Peak Universal Bond avec Uveneer apporte un vrai avantage.

PEAK
UNIVERSAL ADHESIVE SYSTEM

