




LA DERNIÈRE GÉNÉRATION D'ADHÉSIFS AU SERVICE DE VOS RESTAURATIONS

IPERBOND MAX est un adhésif universel (8^{ème} génération) **monocomposant, auto-mordançant** et **photopolymérisable** pour un collage fiable en une seule étape. Sa formulation à base de monomères acides 4-META et 10-MDP, qui agissent comme de puissants agents de structure, permet une liaison tenace à la dentine comme à l'émail.

Ses points forts

- Adhésif universel: etching, primer et collage en un seul produit
- Viscosité optimisée et grande thixotropie : adhésion via une couche homogène sans excès
- Matériau **stable dans le temps** ne nécessite pas de stockage au réfrigérateur
- Mordançage doux, qui réduit les risques d'hyper-sensibilité (2> pH> 2,5)
- 1 seule bouteille, 1 seule application et seulement 10 secondes de polymérisation : rapide, simple et fiable

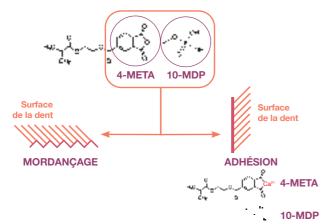








1 Flacon unique,1 Seule application




Sans TEGDMA / BPA : produit parfaitement biocompatible

Force d'adhésion à la dentine (MPa)

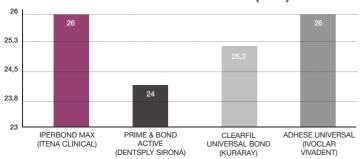


Force d'adhésion à l'émail (MPa)

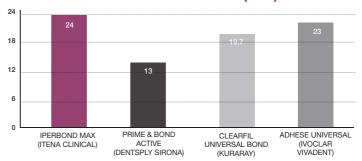

IPERBOND MAX présente des valeurs de force d'adhésion équivalentes (dentine) voire supérieures (émail) aux produits concurrents.

Indications

- Restaurations directes en composites photopolymérisables sur dent naturelle
- Restaurations indirectes effectuées en composite, céramiques (inlays, onlays, facettes, couronnes) avec des composites photopolymérisables (ou à prise duale, mais toujours photopolymérisé)
- Réparations de restaurations fracturées

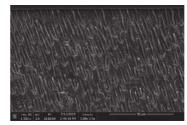

Observation au microscope éléctronique à balayage. Formation de tags d'Iperbond Max sur la dentine (section x1500)⁽¹⁾

IPERBOND MAX est compatible avec tous les matériaux composites photopolymérisables conventionnels.



Surface	Force d'adhésion (ISO 29022:2013)
Dentine	26 MPa
Email	24 MPa
Zircone + sablage	46 MPa
Disilicate de lithium + mordançage + silane (surface préparée)	36 MPa

(1) Rapport de test interne du département Recherche & Développement d'Itena Clinical.

ITENA CLINICAL,

PARTENAIRE DE VOS MEILLEURES RESTAURATIONS



QUICK BOND

Système adhésif auto-mordançant en 2 étapes (SAM2)

+ BOND ACTIVATOR

Chémo-activateur pour QUICK BOND





IPERBOND MAX
Adhésif universel





MICRO-APPLICATEURS

- coniques pour l'intérieur des canaux
- sphériques pour vos inlays/onlays



