


Alveogyl

Alvéolite sèche ? Soulagez la douleur

Alveogyl est le pansement alvéolaire idéal en cas d'alvéolite sèche, soulageant rapidement vos patients et facile à utiliser. Alveogyl peut aussi être utilisé comme pansement alvéolaire après extraction dentaire.

Alveogyl est un traitement en une séance et s'élimine progressivement, ne demandant ni suture si attention particulière hormis la surveillance du processus de cicatrisation. Il procure un effet calmant sur les tissus alvéolaires, permettant ainsi de rapidement soulager la douleur. Sa texture fibreuse, grâce aux fibres de Penghawar, permet une mise en place facile et une bonne adhérence à l'alvéole.

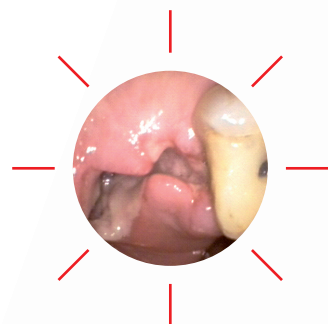

Pour commander Alveogyl,
contactez votre distributeur local.

Caractéristiques

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Contient des fibres de Penghawar	Texture fibreuse	Facilite la mise en place et permet une bonne adhérence à l'alvéole
Pansement alvéolaire pour alvéolite sèche	Permet un effet calmant sur les tissus alvéolaires pendant le processus de cicatrisation	Aide à soulager rapidement la douleur
Ne nécessite pas de suture	Ne demande pas d'attention particulière pendant le processus de cicatrisation	Pratique et facile à utiliser
S'élimine tout seul	Procédure en une séance	Pas de besoin de séances de rappel

Indications

Alveogyl peut être utilisé comme pansement alvéolaire après l'extraction dentaire difficile ou traumatique chez les patients ayant un historique d'alvéolite sèche.

Mode d'emploi

- Prélever une petite boulette de pâte (environ 0,20 g) d'Alveogyl
- L'insérer délicatement dans l'alvéole dentaire préparée préalablement
- Ne pas suturer

Information produit



Alveogyl

Pot de 10g

