

Cas de stratification postérieure



- 1 Radiologie Bite wing objectivant la carie sur 36.
- 2 Situation initiale avant traitement. Carie occlusale sur la première molaire inférieure gauche.
- 3 Choix de la teinte avec le teintier Vita : A2.
- 4 Traitement de la carie
- 5 Mordançage de l'émail pendant 30 s et de la dentine avec DENTOETCH pendant 15 s.



- 6 Rinçage pendant 15 s et séchage de la cavité jusqu'à obtenir un aspect crayeux blanc de la surface.
- 7 Application de l'adhésif IPERBOND ULTRA pendant 20 s. Puis léger jet d'air pendant 5 s. Répéter l'opération une seconde fois. Photo polymérisation pour 20 s + 20 s.
- 8 Mise en place d'une fine couche de IONOCEM (ciment verre ionomère) : technique sandwich.
- 9 Application d'une couche de REFLECTYS Flow A3. Photo polymérisation pour 20 s.
- 10 Application du composite dentine REFLECTYS A2 en deux temps. Photo polymérisation pendant 20 s à chaque apport.



- 11 Application du composite émail REFLECTYS E en fine couche. Photo polymérisation pour 20 s.
- 12 Couche de glycérine et photo polymérisation pour 20 s.
- 13 Contrôle de l'occlusion, retouches et polissage avec les polissoirs diamantés PERFECT POLISH flamme.
- 14 Situation finale après traitement et réhydratation complète.

Dr Marco Morello (Italie)

REFLECTYS
UNIVERSAL RESTORATIVE COMPOSITE

REFLECTYS

UNIVERSAL RESTORATIVE COMPOSITE

Seringue (4g) :
17 teintes*

Compule (0,25g) :
17 teintes*

Kit de restauration :

pour toutes vos restaurations du quotidien
4 seringues Reflectys (A2, A3, A3.5, B2)
+ 1 Adhésif Iperbond Ultra

Kit de stratification :

pour les cas esthétiques les plus délicats
7 seringues Reflectys (A1, A2, A3, Opaque A2, Opaque A3, Email, Incisal)
+ 1 Adhésif Iperbond Ultra
+ 1 gel de mordançage DentoEtch



Reflectys Flow
La version fluide de Reflectys (2g)

www.itena-clinical.com
ITENA
CLINICAL PRODUCTS

* Bleach, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, Opaque A2, Opaque A3, Email, Incisal, Pedo. Voir gamme de teintes au dos.

Dispositif médical marqué CE0425, de classe IIa, pour soins dentaires. Réservé aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice avant toute utilisation. Itena Clinical, 31 avenue Georges Clemenceau 93420 Villepinte, France - Tel : + 33 (0)1 45 91 61 40 Ind 2 - 04/21

REFLECTYS
UN COMPOSITE
ESTHÉTIQUE
POUR TOUTES VOS
RESTAURATIONS

ITENA
CLINICAL PRODUCTS

Formulé pour vos cas cliniques des plus simples aux plus complexes

Depuis son lancement en 2012, Reflectys compte parmi les composites dentaires les plus performants du marché.

ITENA Clinical a choisi de simplifier votre pratique en proposant un composite adapté aussi bien à vos cas du quotidien qu'à des situations cliniques plus complexes.


Une composition optimisée

Ce composite micro-hybride nano-renforcé photopolymérisable est composé de 20% de résine matricielle et 80% de charges inorganiques.

Un mélange de particules de tailles et de composition différentes qui permet d'augmenter le pourcentage de charges et les propriétés mécaniques du composite.

Résultats :

- des propriétés esthétiques et de manipulation optimisées.
- de meilleures propriétés de polissage et de résistance.

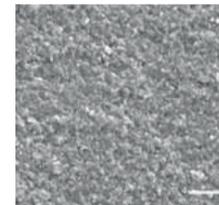

Coupe transversale de Reflectys au microscope à balayage électronique x 10 000



Mettez tous les atouts de Reflectys de votre côté

Une esthétique exceptionnelle

- Réel pouvoir de mimétisme : parfait reflet de la dent naturelle.
- Résultat extrêmement brillant après polissage.
- Obturation invisible : les limites du composite ne sont pas perceptibles.
- Faible retrait de polymérisation : impeccable intégrité au niveau des limites de la restauration.


Une manipulation aisée

- Matériau d'une excellente malléabilité : texture idéale qui se sculpte aisément et rapidement.
- Ne colle pas aux instruments ni aux gants.
- Polissage rapide et facile.


Le composite idéal pour toutes vos restaurations antéro-postérieures.

De remarquables propriétés mécaniques

Grâce à sa composition riche en micro-particules et nano-particules, Reflectys présente une résistance optimale à l'abrasion, à la compression et à la fracture.

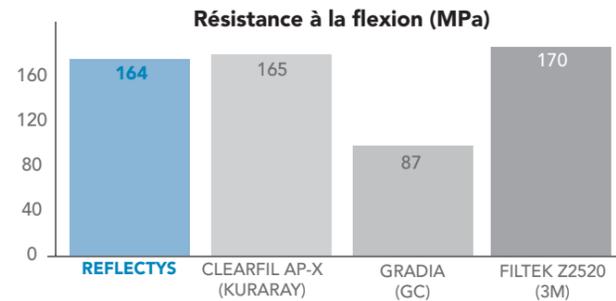


Source : étude interne, R&D Itena Clinical

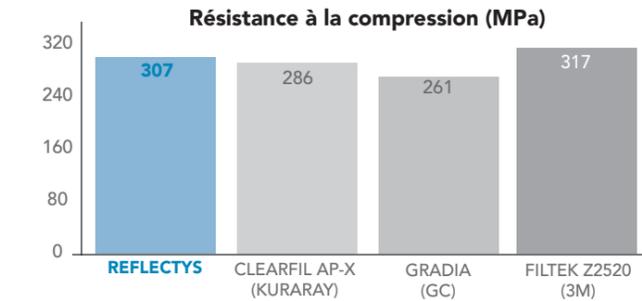

Pour réussir toutes vos restaurations


Teintes "Dentine"

Teintes universelles avec une translucidité moyenne pour s'adapter à tous les cas cliniques.

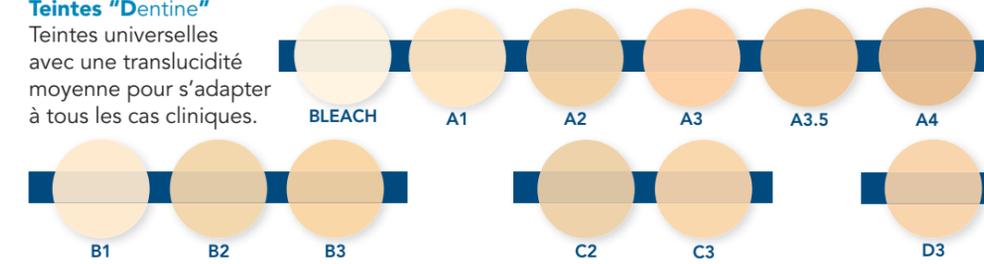


Teintes « Opaque »

Translucidité très faible pour masquer les colorations dentaires.

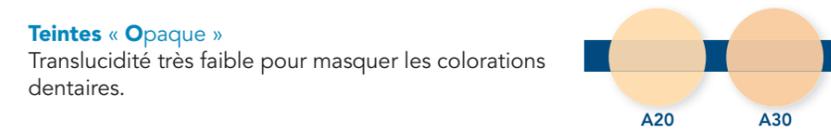

Teinte Email

Très haute translucidité. Cette teinte a pour but de reproduire la couche d'émail au dessus de la couche opaque ou dentine, précédemment photopolymérisée. Elle se destine aux dents adultes.

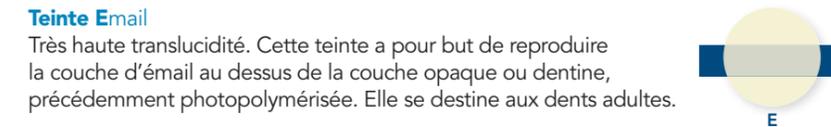


Teinte Incisal

Très translucide. Développée pour les restaurations de l'émail des jeunes adultes et pour les zones qui nécessitent une transparence naturelle.




Teinte Pedo

Translucide et légèrement crayeux. Recommandée pour les dents de lait.

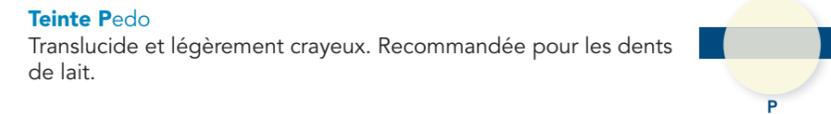

17 teintes disponibles en format seringues ou comples

- Ce large choix vous permet de reconstituer votre propre teintier.
- Vos stratifications sont optimisées, pour un résultat esthétique naturel.

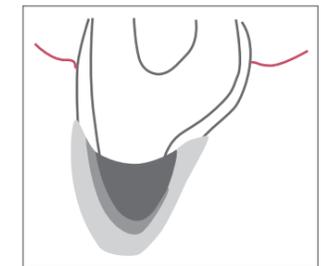

- Teinte dentine opaque
- Teinte dentine de corps
- Teinte email

Photos non contractuelles